

HandiSnow-5

Piggekjelke



BRUKERVEILEDNING

CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012

HandiSnow-5 piggekjelke

Versjon 1.02

01/06-2016

HandiNor as
Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo
Tlf: +47 63 88 72 40
www.handinor.no

HandiSnow-5 piggekjelke

Art.nr: _____

Serienr: _____

Dato: _____

Maks brukervekt: 110kg



HandiNor AS
Rosenholmveien 22
NO-1252 Oslo, Norway

HandiNor



Innledning

HandiSnow-5 piggekjelke leveres ferdig montert fra leverandør, med unntak av skiene.

Piggekjelken er beregnet til pigging på snø, men kan også benyttes med rulleski (tilbehør) på asfalt om sommeren.

HandiSnow-5 er egnet for både enbens- og dobbeltamputerte, samt personer med redusert bevegelse i bena. Den høye sittestillingen gjør at de med god sittebalanse får en optimal piggestilling.

Ved å montere på høyere rygg og magebelte kan den fint benyttes av personer med høyere skade.

Seteplaten og knestøtten har flere slissespor som gir justeringsmuligheter på vinkling i forkant og bakkant for optimal sittevinkel.

For å få optimal utnyttelse av piggekjelken, er det viktig å få den tilpasset korrekt i forhold til hver enkelt bruker.

Det er viktig å kjenne til piggekjelkens innstillingsmuligheter.

Les denne brukerveiledningen før piggekjelken tas i bruk.

Sikkerhet

- Advarsel:** Før du bruker piggekjelken må du forsikre deg om at kjelken er i forsvarlig sikkerhetsmessig stand. Sjekk at alle skruer/muttere sitter godt fast, at setereimer fungerer som de skal og at bindingene på skiene er i god stand.
- Advarsel:** Piggekjelken er kun til bruk på snø påmontert ski, eller på asfalt påmontert rulleski. **Husk å bruke hjelm når rulleski benyttes!**
- Advarsel:** Pigg aldri over stein og grus, dette vil ødelegge sålen på skiene.
- Advarsel:** Bremsen er kun beregnet for bruk på snø! Bremsen må ikke brukes når rulleski er påmontert piggekjelken.
- Advarsel:** Kjør forsiktig i nedoverbakker, slik at du har kontroll på kjelken.
- Advarsel:** Overflaten kan bli varm om sommeren, men du vil aldri kunne brenne deg.
- Advarsel:** Piggekjelken er godkjent for brukervekt på maks 110 kg.


Tekniske spesifikasjoner

	HandiSnow-5 str. 1	HandiSnow-5 str. 2
Varenummer	503217-30	503217-35
Egenvekt	6,5 kg	7 kg
Setebredde	30 cm	35 cm
Setedybde	25 cm	25 cm
Sittehøyde bak	47,5 - 50 cm	47,5 - 50 cm
Sittehøyde foran	43 - 46 cm	43 - 46 cm
Rygghøyde	15 cm	15 cm
Dybde knestøtte	18	18
Materiale hovedramme	Aluminium	Aluminium
Standard skilengde	182 cm	182 cm
Maks brukervekt	110 kg	110 kg
Estimert levetid	3 år	

Montering og demontering av ski

Før kjelken kan tas i bruk må skiene monteres.

Åpne skiens binding helt opp

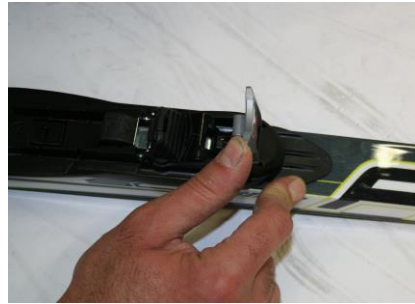

Før kjelkens bakre bindingsfeste inn i festekroken og sett den fremre bindingsfoten ned i bindingen. Lås bindingen.



Ved demontering av ski åpnes skibindingen og kjelkens bindingsfot løsnes. Skyv så kjelkens bakre bindingsfeste ut av festerkroken.




Fastspenning og innstillinger

Før du setter deg i kjelken åpnes de 2 setereimene med jekkemekanisme.



Plassering av knær og ben

Sett deg i kjelken med knærne hvilende på knestøtten, og legg bena på fothvilerne under setet.

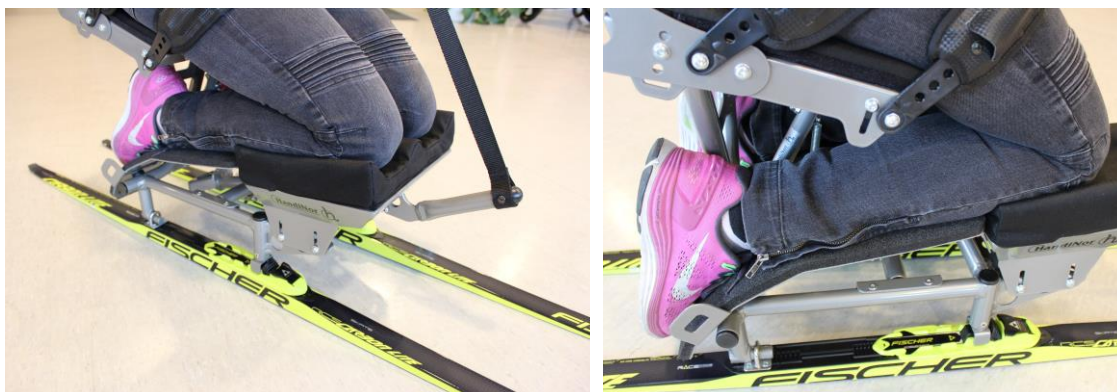


For å justere vinkelen på knestøtten, løsnes de 2 M6 skruene med en umbraconøkkel og en 10 mm fastnøkkel. Juster til ønsket vinkel og skru godt til igjen.

For å justere fothvilerne løsnes M6 skruen i front bak knestøtten med en umbraconøkkel og en 10 mm fastnøkkel. Juster til ønsket vinkel og skru til igjen.

Festereim for fot


Fest de 2 fotreimene med velcro. Fotreimene hindrer at bena faller ut av fothvileren under aktivitet.

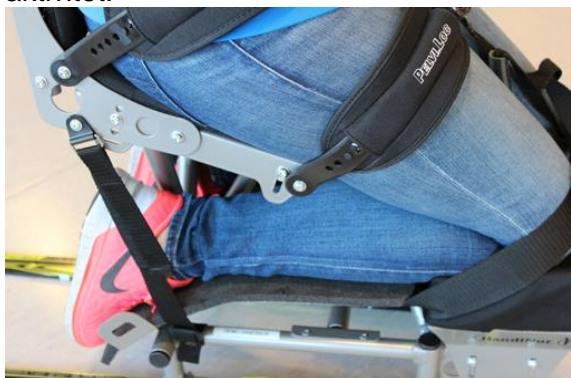

Håndbrems

Når du har satt deg tilrette i kjelken, hektes bremsens nylon snor med håndtak inn på fremre setereim, slik at den er lett å få tak i når du skal bremse.

Kraften du trekker bremsesnoren med avgjør hvor mye det bremser. Jo lengre opp du trekker snoren, jo mer bremser det.

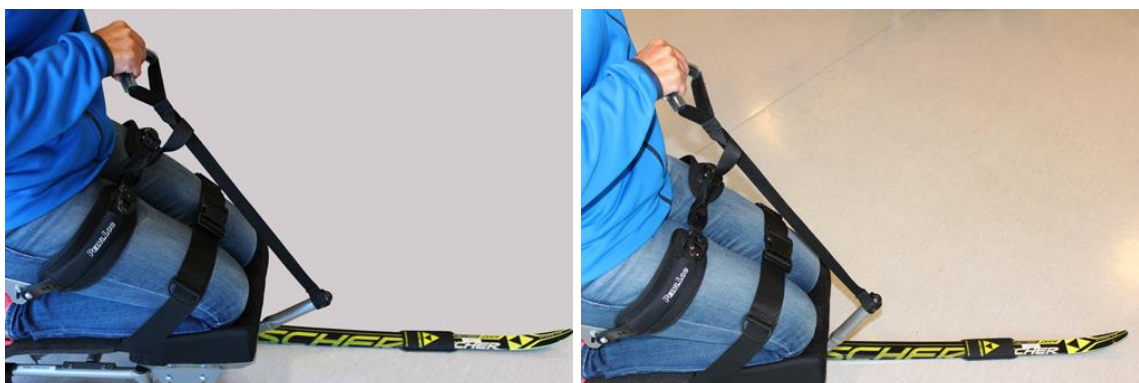

VIKTIG! Bremsen er kun til bruk på snø!. Den må ikke brukes når rulleski er påmontert piggekjelken.

Fastspenning i sete

Fremre og bakre setereim med jekkemekanisme spennes fast. Reguleres slik at man sitter godt fastspent. Start med bakre setereim. Når fremre setereim er fastspent, etterstrammes bakre setereim med jekkemekasismen. Til slutt etterstrammes fremre setereim med jekkemekanismen.



Lårbelte

Fest lårbelte med fix-lock spenne og dra godt til.



Åpning av setereimer med jekkemekanisme

Når du skal ut av piggekjelken, løsnes fremre og bakre setereim med jekkemekanisme som vist på bilde under.



Justering av setehøyde/setevinkel

Seteplaten har 3 slissespor i bakkant som gjør det mulig å velge setehøyde. Det er ca. 1,2 cm mellom hvert slissespor. Skru ut M6 umbracoskruen på hver side med en 4 mm umbraconøkkel, og skru de godt til igjen i ønsket slissespor.

For endring av høyde/vinkel i forkant på sete, løsne M6 umbracoskruene på hver side med en 4 mm umbraconøkkel, og skru de godt til igjen i ønsket posisjon.

Justering av knestøttevinkel

Løsne de 2 M6 umbracoskruene på hver side med en 4 mm umbraconøkkel og hold igjen mutter på baksiden med en 10 mm fastnøkkel. Juster til ønsket vinkel og skru alt godt til igjen.

Justering av fothvilere

Løsne M6 umbracoskruene som sitter i front av fothvilere ved knestøtten med en 4 mm umbraconøkkel og hold igjen mutter under fothvilere med en 10 mm fastnøkkel. Skru alt godt til igjen i ønsket posisjon.

Rygg

Rygg demonteres ved å løsne M6 umbracoskruene på hver side.

Tilbehør

Piggekjelken kan leveres med rygg H-20 cm og magebelte for de som har litt høyere skade. Det er også mulig å få Rollersafe rulleski med hydrauliske bremsere, skistaver med asfaltpigge for bruk med rulleski. sele/belte med 2 elastiske tau og karabinkroker.

Kjelken kan også spesialtilpasses om nødvendig.

Transport av piggekjelken

Når skiene er demontert kan piggekjelken enkelt løftes inn og ut av bagasjerommet i bil. Skiene fraktes i bilen eller på biltaket (om bilen har takbøyler).

Vedlikehold

Sjekk jevnlig at alle skruer og muttere på seteplate, knestøtte, fothvilere og håndbrems sitter godt fast. Etterstram om nødvendig.

Rammen vaskes med fuktig klut ved behov.

Polster vaskes med fuktig klut ved behov. Se forøvrig vaskeanvisning.

Ta skiene av kjelken når den ikke er i bruk. Skiene bør settes opp mot veggen for å beskytte sålen på skiene evt. settes skiene sammen med skiparholdere.

Viktig å tørke av snø når skiene tas av. Fjern eventuell snø i bindingsfestet.

Pigg aldri over stein og grus, dette vil ødelegge sålen på skiene.

Skiene bør prepareres jevnlig, avhengig av bruk. Dette for å gi optimal mestringsfølelse av piggingen. Skiene skal kun glides, bruk aldri festesmøring!

Skiene som benyttes på våre piggekjelker er skøyteski med gode glideegenskaper.

Service

Service skal utføres av kvalifisert personell.

Det skal kun brukes originale reservedeler, levert av produsent, eller en av produsentens godkjente leverandører.