

Multiroller Jogger

Brukerhåndbok



Vi takker for at du har valgt Multiroller.
Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetstiltak.....	side 3
Montering.....	side 3
Hurtigkobling på bakhjulene.....	side 4
Parkeringsbrems.....	side 5
Trommelbrems.....	side 5
Rengjøring og vedlikehold.....	side 5

1. Sikkerhetstiltak



Advarsel (dette symbolet betyr at ved ukorrekt bruk er det høy fare for personskade.)

Vennligst merk før bruk av Multiroller:

- Les brukerhåndboken før bruk.
- La aldri barnet sitte i Multiroller uten tilsyn.
- Ha alltid på parkeringsbremsen når Multiroller ikke er i bevegelse.
- Multiroller skal kun benyttes av personer under 50 kg.
- Kun personer skal plasseres i Multiroller.
- Fest alltid barnet med det rette støtte- og posisjoneringsutstyret i Multiroller.
- Regelmessige inspeksjoner er nødvendig for trygg kjøring.
- Bruk ikke Multiroller som et leketøy. La ikke voksne sitte i den.
- Har du flere spørsmål om Multiroller, ta kontakt med Hjelpemiddelspecialisten AS.



Henvisning:

- Bruk ikke Multiroller dersom den er defekt.
- Forsøk ikke å utføre noen reparasjoner selv.

2. Montering

Hjelpemiddelspecialisten AS leverer alle vogner ferdig montert. Det eneste man trenger å gjøre er å slå opp vognen til man hører den «klikke» på plass.

Slå sammen

Multiroller slås sammen på samme måte som den slås opp. For å redusere størrelsen ytterligere kan man ta av front rammen, og løsne bakhjulene med hurtigkoblingen.





Henvisning:

Første gangen Multiroller slås sammen kan den virke noe stiv p.g.a. stramming av skruer og muttere på fabrikken.

Juster vinkelen på styret til ønsket posisjon ved å trykke inn knappene på styret med tomlene. Når knappene slippes opp igjen og du hører et klikk, låser styret seg.

3. Hurtigkobling på bakhjulene

For hurtigkobling, hold knappen på hjulakselen nede for å fjerne og feste bakhjulene. Hjulene skyves enkelt av og på rammen. Forsikre alltid at hjulene er ordentlig på.



Henvisning: Forsikre alltid at hjulene sitter godt på rammen.



Henvisning: Sjekk regelmessig at det er nok luft i dekkene: min. 35, maks 65 P.S.I. bzw. 2,8 bis 4,5 bar. Riktig dekktrykk er skrevet på dekket. Dekktrykket bør være likt på begge sider for å forsikre at hjulene kjører rett.

4. Parkeringsbrems

Multiroller leveres med standard parkeringsbrems. Tråkk på bremsepedalen (pedalen er ned til høyre) og klossene presses inn på hjulbasene. Beveg samtidig Multiroller forsiktig fram og tilbake, fordi bremsen ikke umiddelbart berører hjulene.



Henvisning: Ha alltid på parkeringsbremsen når noen setter seg i, eller går ut av Multiroller.

5. Trommelbrems



Henvisning: Forsikre at alt som er montert sitter godt fast.



Henvisning: Bruk bremsen hyppig og se etter at det fungerer.



Henvisning: Bremskabelen strekkes etter bruk over lang tid og må til slutt justeres.



Henvisning: Trommelbremsen er veldig kraftig. Gjør deg kjent med funksjonen før bruk. Vi holdes ikke ansvarlig for påfølgende skader på personer eller gjenstander.

6. Rengjøring og vedlikehold

Fjern setet fra Multiroller (stoffsetet med innleggs puter eller forskjellige valg til justerbar rygg) i omvendt rekkefølge som beskrevet under punkt 2.3.



Henvisning: Vask trekket for hånd med lunket vann og mildt vaskemiddel. Lufttørk. Unngå kjemikalier og tøymykner. Trekket skal være helt tørt før bruk.



Henvisning: Ved lagring av Multiroller, slås den sammen og lagres tørt uten solllys. Dersom den ved siste bruk ble våt, tørk før lagring.

Ramme og bakhjul:

Bruk en myk klut for rengjøring av ramme og bakhjul. Unngå damp for rengjøring av understell. Ta bakhjulene av og sjekk dem regelmessig, både hjul og akse. Aksen skal være dekket i et tynt lag olje for å unngå rust. Sjekk regelmessig alle skruer.

Slitasje:

Gå regelmessig over alle fester på Multiroller og sjekk for slitasje. Fuktighet, dårlig vær, høyt salt-innhold i luften rundt kysten eller forurensing kan føre til slitasje på metalledene. Skruer og muttere med rust skal erstattes av din spesialforhandler.



Henvisning: For å beskytte Multiroller, lagre kun i tørre, ventilerte rom. Merk også henvisningene til beskyttelse av ramme og hjul.